

**FINNISH** KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYKSENSUOJAIN CE0370  
BANER BT-005 FFP2 NR (FFP2WV)

Brandi: BANER  
Ce: 2163-PPE-742  
Malli / Model: BT-005

FIN

Tuotteen nimi: BANER BT-005 FFP2 NR  
Kuvaus: Hengityssuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu Kertakäyttöön. Ulompi ja sisempi kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välikerros sulatetuista tekstiileistä.

Suojaintyyppi: Kertakäyttöinen hengitys suojain  
Määrä: 30kpl rasiassa  
Sovellettu standardi: EN 149 : 2001 + A1:2009, FFP2 NR  
Viittaus asetukseen: EU 2016/425  
Valmistuspäivämäärä: Katso tuotepakkauksesta  
Säilytysaika: 2-vuotta valmistuspäivämäärästä.  
Käyttö: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suojelemaan väestöä mikro-organismeilta ja pieniltä hiukkasilta. Vain kertakäyttöön, ei steriili.

Merkinnät:

R = Uudelleenkäytettävä  
NR = Ei uudelleenkäytettävä (vain yhden työvuoron ajan käytettävä)  
D = Täyttää tukkeutumattomuutta koskevat vaatimukset

Varoitus:

1. Tuotetta ei tule käyttää ympäristössä, joissa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta eikä vedenalaisessa ympäristössä.
2. Älä käytä avoimen liekin läheisyydessä (kuten hitsauksen, muovauksen jne. ainkana.)
3. Hengityksen suojaimen käyttö ei poista tartuntariskiä
4. Tuotteen käytön laiminlyönti voi johtaa sairauteen.
5. Käytä tuote kahden vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä
6. Älä käytä, jos pakkaus vaurioitunut.

HUOMAA:

1. Tarkista hengityksensuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaat, vaurioita, öljytahroja tai hajuja.
2. Jos koet hengenahdistusta, huimausta tai muuta epämukavuutta, poistu saatuneelta alueelta välittömästi.
3. Vaihda hengityssuojain heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen on vakavaa.

SÄILYTYS:

1. Varastoitava asianmukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.
2. Vältä mekaanista rasitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, auringonpaistetta, ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa.
3. Säilytys -20-38 C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa <80%.

VALMISTAJA: SHANDONG JIANGPO SANITARY PRODUCTS CO., LTD  
Address: East of Nanding Village, Laozhaozhuang Town, Linqing City, Shandong Province Tel: 0371-86151827

TESTAAJA:

BeFitLab, testattu ja CE- hyväksytty standardin EN149:2001+A1:2009 mukaisesti.  
Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.  
Necip Fazal Bulvar Keyap Sitesi E2 Blok No:44/84 Yukar Dudullu Ümraniye -  
ISTANBUL- TURKEY Tel: 902164558080  
[www.universalcert.com](http://www.universalcert.com)  
Raportti nro: 2073-KKD-742  
Hyväksytty testi 15.6.2020  
Säilytä tämä ohje huolellisesti.

UNIVERSAL  
CERTIFICATION

CE-SERTIFIKAATIN MYÖNTÄJÄ:


Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.

MAAHANTUONTI JA MARKKINOINTI:

Huippu Group Oy  
[www.hg-hygienic.fi](http://www.hg-hygienic.fi)  
Puh. +358 50 441 4539 / +358 50 4904065

Hengityssuojaimen käyttö:

1. Muodosta nenälle sopiva muoto taivuttamalla nenänkiinnintä. Pidä suojainta kämmenellä niin että kiinnitysnauhat roikkuvat alaspäin.
2. Aseta suojain nenän ja suun päälle. Vedä alempi hihna niskaan taakse ja ylempi hihna pään taakse.
3. Käytä molempia käsiä asettaaksesi nenänkiinnitin nenän ympärille.
4. Varmista, että suoja on tiiviisti paikallaan. Siirrä tarvittaessa hihnojen paikkaa.

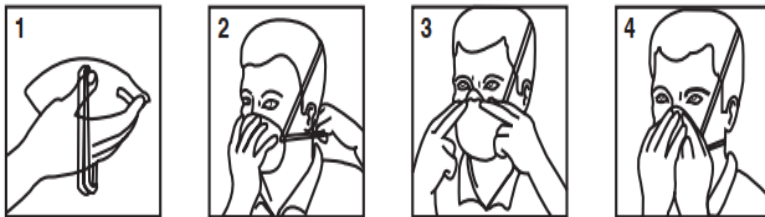

**Huom!** Varmista että hengityssuojain on tiivis hengittämällä voimakkaasti sisään ja ulos.  
Varmista ettei ilmaa pääse vuotamaan suojaimen reunoilta. Säädä tarvittaessa suojainta.

MERKKIEN SELITYKSET



Ei uudelleenkäytettävä  
Kan inte återanvändas

RUMMERINGAR KOMMENTAR




Huomio, katso käyttö-ohjeet ennen käyttöä  
Observera, se bruksanvisningen före användning



Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut  
Använd inte om paketet är skadat



Katso valmistajan toimittamat tiedot  
Se information från tillverkaren

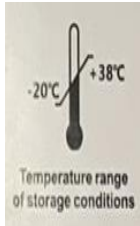

Säilytyslämpötila  
Förvaringstemperatur



Varastointiolosuhteiden suurin suhteellinen kosteus  
Maximal relativ luftfuktighet för lagringsförhållandena

## SWEDISH

BANER BT-005 FFP2 NR (FFP2WV)

Brandi: BANER  
CE: 2163-PPE-742  
Modell: BT-005

## SWE

Produktnamn: BANER BT-005 FFP2 NR  
Andningskyddet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkade av nonwoven-tyg och mellanlagret av smältblåst tyg.

Typ av andningsskydd: Andningskydd för engångsbruk.  
Kvantitet: 30st förpackning  
Tillämpad Standard: EN 149 : 2001 + A1:2009, FFP2 NR  
Förordningens referens: EU 2016/425  
Förvaringstid: Two år från tillverkningsdatumet.  
Användning: Produkten är avsedd att bäras för att skydda allmänheten mot mikroorganismer och små partiklar. Endast för engångsbruk. Ej steril.

Markeringar: R = Återanvändbar  
NR = Kan inte återanvändas  
D = Uppfyller icke-igensättningskrav

Varningar:

1. Produkten bör inte användas i miljöer med skadliga gaser eller ångor, syrebrist eller under vatten.
2. Använd inte i närheten av öppen eld (såsom vid svetsning, formning osv.).
3. Användning av andningsskydd eliminerar inte risken för att smittas av en sjukdom eller infektion.
4. Underlåtenhet att använda och underhåll produkten enligt anvisningarna kan

resultera i sjukdom.

5. Använd produkten inom två år från tillverkningsdatumet.

6. Använd inte om förpackningen är skadad.

**OBSERVERA:**

1. Kontrollera andningsskyddet utseende innan användning. Använd det inte om du lägger märket till skador, oljefläckar eller lukter.
2. Om du upplever andnöd och yrsel eller annat obehag, vänligen lämnä det kontaminerade området genast.
3. Byt genast ut andningsskyddet mot ett nytt om du känner att det blir svårare att andas.

**FÖRVARING:**

1. Måste förvaras korrekt utanför förorenade områden.
2. Undvik mekanisk belastning, fukt, hög temperatur, solsken och kontakt med frätande kemikalier.
3. Vi rekommenderar att produkten förvaras i -20-38 C med in relativ luftuktighet på <80 %.

**TILVERKARE:**

SHANDONG JIANGPO SANITARY PRODUCTS CO., LTD  
Address: East of Nanding Village, Laozhaozhuang Town, Linqing City, Shandong Province  
Tel: 0371-86151827

**TESTLABORATORIUM:**

BeFitLab, testad och CE-godkänd enligt EN149: 2001 + A1: 2009.  
Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.  
Necip Fazal Bulvar Keyap Sitesi E2 Blok No:44/84 Yukar Dudullu Ümraniye -  
ISTANBUL- TURKEY Tel: 902164558080  
[www.universalcert.com](http://www.universalcert.com)  
Certifikat nummer: 2073-KKD-742  
Hyväksytty testi 15.6.2020  
Förvara denna bruksanvisning.

**UTGIVARE AV CE-CERTIFIKAT:**

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.


**IMPORT OCH MARKNADSFÖRING:**

Huippu Group Oy  
[www.hg-hygienic.fi](http://www.hg-hygienic.fi)  
Puh. +358 50 441 / +358 50 4904065

**Bruksanvisning:**

1. Håll masken i kupad hand med näskupan uppåt och gummibanden hängande.
2. Placera skyddet över näsan och munnen. Dra den nedre remmen bakom nacken och den övre bakom huvudet.
3. Använd båda händer för att placera näskupan runt näsan för att skapa god tätning.
4. Säkerställ att skyddet är tätt på sin plats. Flytta på remmarna vid behov.



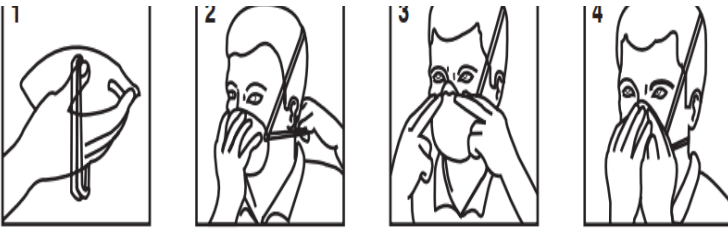

**OBS!** Säkerställ tätningen genom att kraftigt andas in och ut. Säkerställ att luften inte tränger sig igenom ur skyddets kanter. Justera skyddet vid behov.